



# Babysleep<sup>®</sup>

Mascarilla de ojos para fototerapia

**Instrucciones de Uso.**

## Componentes



### Mascarilla:

Cubre los ojos del bebé para protegerlos de la luz.



### Correa:

Se ajusta alrededor de la cabeza del bebé para mantener la mascarilla en su lugar.



### Velcros (2):

Unen los extremos de la correa a los extremos de la mascarilla.

## Pasos

- 1- Coloque la correa:** Pase la correa por detrás de la cabeza del bebé y traiga los extremos hacia adelante.
- 2- Posicione la mascarilla:** Suavemente coloque la mascarilla sobre los ojos cerrados del bebé asegurándose de que cubra completamente los ojos.
- 3- Ajuste la correa:** Tome un extremo de la correa y fíjelo al extremo correspondiente de la mascarilla usando uno de los velcros. Repita el paso anterior con el otro extremo de la correa y el velcro restante, ajustando la mascarilla sobre los ojos del bebé.
- 4- Verifique el ajuste:** Asegúrese de que la mascarilla esté bien colocada sobre los ojos y que la correa no esté demasiado apretada ni demasiado floja. Debe ser cómoda para el bebé y mantener la mascarilla en su lugar.



## Precauciones:

**Siempre asegúrese de que los ojos del bebé estén cerrados antes de colocar la mascarilla.**

**Revise la mascarilla periódicamente para confirmar de que no se haya movido.**

## Recuerde:

La fototerapia es un tratamiento importante para la ictericia. La mascarilla de ojos es esencial para proteger los ojos del bebé durante el tratamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones de su médico y consulte con él, cualquier duda.

**Dudas o recomendaciones:  
[tecnovigilancia+info@babysleep.lat](mailto:tecnovigilancia+info@babysleep.lat)**